

Pielęgnacja i Środki Ostrożności:

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i skonsultować się z lekarzem w razie występowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Odzież uciskowa SIGVARIS GROUP powinna być wygodna i nigdy nie powinna sprawiać bólu. W razie odczuwania jakiegokolwiek bólu lub dyskomfortu, lub wystąpienia widocznych śladów na skórze świadczących o reakcji skórnej lub nadmiernym ucisku, należy natychmiast zdjąć odzież i skonsultować się z lekarzem.

Środki Ostrożności:

Należy podjąć szczególne środki ostrożności, jeśli wyroby uciskowe mają być stosowane u pacjentów z następującymi wskazaniemami granicznymi:

- Choroba okluzyjna tętnic obwodowych (PAOD) z ABPI 0,6-0,9 i (lub) ciśnieniem w okolicy kostki na poziomie 60–90mmHg
- Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA I-II) i obrzękiem żylnym lub limfatycznym powinni rozpocząć łagodną kompresję w dolnych nogach, zanim zostanie ona rozciągnięta na obszar uda
- Cukrzyca
- Choroby skóry z towarzyszącym masywnym wysiękiem lub mieszanym owrzodzeniem tętniczo-żylnym
- Decyzje odnośnie leczenia należy podejmować indywidualnie i z uwzględnieniem starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka
- Odzież uciskowa służąca złagodzenia stanu zapalnego, bólu lub obrzęku w przypadku róży lub zapalenia tkanki łącznej (cellulitu) na nogach należy stosować wyłącznie w połączeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym
- U wrażliwych pacjentów można zapobiegać podrażnieniom skóry stosując odpowiednie preparaty do pielęgnacji skóry pod odzieżą uciskową
- Nie należy zakładać wyrobów spodnich i nieelastycznej odzieży bezpośrednio na rany