

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Stosowanie medycznych wyrobów pończoszniczych o działaniu uciskowym należy skonsultować ze specjalistą. Badania kontrolne u lekarza są bardzo ważne i należy ich koniecznie przestrzegać. Z reguły medyczne wyroby pończosznicze o działaniu uciskowym nie wykazują działań niepożądanych, jeśli zostały zalecone przez lekarza i odpowiednio dopasowane. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. W szczególności u pacjentów z zaburzeniami czucia działanie kompresyjne wyrobu może pozostać niezauważone, z tego względu zaleca się kontrolowanie stop pod kątem ewentualnych oznak ucisku, zaburzeń krążenia krwi lub nowo powstałych uszkodzeń skóry.

Wyrób należy stosować tylko na nienaruszoną skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania oraz bezpieczeństwo stosowania.

Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Medyczna skuteczność wyrobów pończoszniczych o działaniu uciskowym gwarantowana jest przy prawidłowym użytkowaniu oraz prawidłowej pielęgnacji przez 6 miesięcy. Po tym okresie noszenia zmniejsza się lecznicza skuteczność wyrobów pończoszniczych na skutek zmęczenia i zużycia materiału.

W przypadku pończoch zastosowany w mankiecie samonośnym silikon może powodować podrażnienie, zwłaszcza w kontakcie z wrażliwą skórą. Nie należy odcinać wystających nici, widocznych wewnątrz wyrobu.