

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrobu nie stosować bezpośrednio na rany, owrzodzenia, uszkodzoną lub chorobowo i zapalnie zmienioną skórę. Przed zastosowaniem produktu należy wyleczyć stan zapalny, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. W przypadku zastosowania po operacji miejsce rany, nacięcia lub naktucia skóry powinno być zabezpieczone opatrunkiem zgodnie z zaleceniami lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego. Opatrunek na ranie (naktuciu w przypadku liposukcji lub nacięciu w przypadku operacji) powinien na niej pozostawać jako zabezpieczenie do czasu wygojenia lub co najmniej do zakończenia okresu wydzielania przez ranę. Najczęściej w miejscu rany stosowany jest opatrunek chłonny lub opatrunek warstwowy składający się z warstwy nieprzywierającej znajdującej się bezpośrednio na skórze, następnie warstwy chłonnej i ewentualnie warstwy nieprzepuszczalnej dla płynów. Opatrunek na ranie powinien być zmieniany, wymieniany lub uzupełniany zgodnie z zaleceniami lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego.

Opatrunek może być przymocowany do skóry poza raną w celu ograniczenia jego przesuwania, przemieszczania w trakcie ruchów i użytkowania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, zaburzeń czucia, wystąpienia reakcji uczuleniowej (alergiczej), świądu, zaczerwienienia, maceracji skóry, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Właściwe użycie produktu może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego. Miejsce założenia, umiejscowienie wyrobu powinno być zgodne z zaprojektowanym przeznaczeniem.

Wyrobu nie należy zakładać na szyję, twarz (poza maską na twarz, która jest w tym celu zaprojektowana), wyrobu nie należy zawiązywać na szyi, twarzy, kończynach. Podczas zakładania wyrobu z elementami metalowymi, jak haftki i zamki błyskawiczne, należy zwrócić uwagę, aby te elementy nie znajdowały się bezpośrednio na skórze uciśnięte przez wyrób, ponieważ może to doprowadzić, na skutek punktowego ucisku, do powstania ran lub odleżyn, maceracji. Kontakt elementów metalowych bezpośrednio ze skórą może również u osób wrażliwych doprowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry lub alergizacji skóry. Dobranie odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem właściwego funkcjonowania wyrobu. Zbyt mały rozmiar wyrobu, wyrób zbyt ciasny może przez ucisk doprowadzić do zaburzenia krążenia, szczególnie do zaburzenia odpływu krwi żyłnej lub zaburzenia przemieszczania chłonki i w ich wyniku doprowadzić do obrzęków. W skrajnych przypadkach okrężny ucisk może zaburzyć krążenie przez zamknięcie napływu tętniczego. Szczegółnej ostrożności wymaga zastosowanie wyrobu bezpośrednio po operacji u osób

pozostających pod wpływem środków anestetycznych stosowanych do znieczulenia ogólnego, silnych leków przeciwbólowych oraz po zastosowaniu znieczulenia miejscowego lub regionalnego ze względu na brak czucia ochronnego. Szczególnej ostrożności wymaga zastosowanie wyrobu u osób z zaburzeniami czucia, neuropatią i cukrzycą (polineuropatia cukrzycowa), polineuropatiami innego pochodzenia, z zespołami uciskowymi nerwów, chorobami tętnic (angiopatia cukrzycowa, zapalenia tętnic), niektórymi chorobami skóry, np. zapalenia naczyń, choroby tkanki łącznej, potwierdzone alergiczne kontaktowe zapalenie skóry na składnik produktu).

Każde użycie wyrobu powinno być poprzedzone sprawdzeniem pod kątem oznak zużycia lub starzenia. Jedynie nieuszkodzony wyrób daje gwarancję optymalnego działania. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba że lekarz zalecił inaczej. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania oraz w rzadkich przypadkach doprowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.